


Алкотестер "SITITEK PRO2" (с часами)

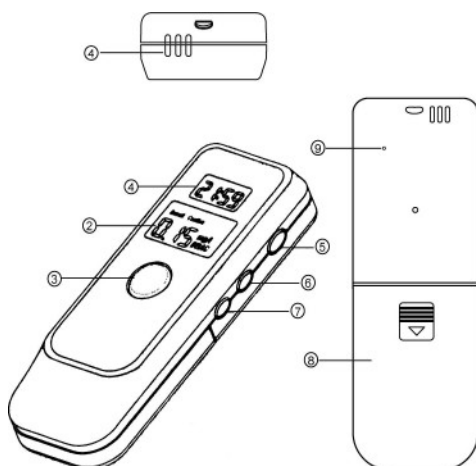

(2) экран алкотестера
(4) отверстие для выдыхания
(6) кнопка установки (SET)
(8) Отделение для батарей

(1) Экран часов
(3) Кнопка включения (POWER)
(5) кнопка выбора режима (MODE)
(7) кнопка регулировки (ADJ)
(9) кнопка сброса (RESET)

Характеристики

1. Двойной LCD дисплей
2. Цифровой алкогольный тест со звуковым предупреждением
3. Диапазон измерений: 0,0...1,9 г/л, 0,00...0,19 ‰ BAC
4. Быстрый вывод результатов и возобновление работы
5. Автоматическое отключение
6. Текущее время и будильник
7. Температура
8. Таймер обратного отсчета
9. Алкотестер работает от двух батареек AAA, часы от одной батарейки AG13


Установка батарей

1. Снимите заднюю крышку



3. Удалите защитную пленку для активации 1,5 В батареи питающую часы
4. Закройте крышку


2. Вставьте две батареи AAA соблюдая полярность

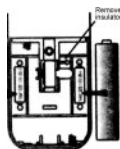

Как использовать алкотестер

Прогревание

1. Нажмите кнопку питания один раз
2. На экране появится символ "Прогревание" ("warm up") и начнется обратный отчет от 9 до 0

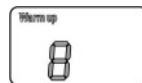

Обратите внимание

- * Если первое прогревание будет прервано, алкотестер перезагрузится автоматически и начнет прогревание заново.
- * После длительного не использования прибора повторите процедуру прогревания несколько раз.

Тест

1. Символ "Дышите" ("Blow") появляется на дисплее когда отчет от 9 до 0 закончен, это значит что устройство готово к использованию.



2. Поднесите прибор ко рту и дуйте в отверстие 3-5 секунд
3. На экране появится результат
4. Символ "Осторожно" ("Caution") появляется, когда концентрация алкоголя низкая.
5. Символ "Опасно" ("Danger") появляется, когда концентрация алкоголя высокая.

Автовыключение устройства происходит после:

1. после вывода результатов теста устройство выключится автоматически через 15 секунд.



2. При прерывании прогревания устройства

Если не дуть в устройство в режиме "TEST", устройство покажет 0.00

Внимание:

Для достижения более точных результатов, рекомендуется

повторить тест 2-3 раза

Индикация низкого заряда батареи

Символ "L" обозначает низкий заряд батареи, устройство автоматически отключится.

Как использовать часы



Фактическое время

1. Нажмите кнопку <ADJ> для установки 12 или 24 часового формата
2. Нажмите и удерживайте <SET> в течение двух секунд для входа в настройку времени, нажмите <ADJ> для регулировки
3. Нажмите <SET> еще раз для перехода установки минут, нажмите <ADJ> для регулировки
4. Нажмите <SET> для подтверждения

Будильник

1. В режиме фактического времени нажмите <MODE> для перехода в режим будильника
2. Нажмите <ADJ> для включения и выключения будильника.
3. Нажмите и удерживайте <SET> в течение двух секунд для входа в настройку времени, нажмите <ADJ> для регулировки
4. Нажмите <SET> еще раз для перехода установки минут, нажмите <ADJ> для регулировки
5. Нажмите <SET> для подтверждения

Температура


1. В режиме фактического времени нажмите <MODE> дважды для перехода в режим температуры
2. Нажмите <ADJ> для выбора единицы измерения C или F

Таймер обратного отсчета

1. В режиме фактического времени нажмите <MODE> трижды для перехода в режим таймера
2. Нажмите и удерживайте <SET> в течение двух секунд для входа в настройку времени, нажмите <ADJ> для регулировки
3. Нажмите <SET> еще раз для перехода установки минут, нажмите <ADJ> для регулировки
4. Нажмите <SET> для подтверждения
5. Нажмите <ADJ> для начала отсчета и еще раз для остановки
6. Когда таймер дойдет до нуля прозвучит сигнал


Сброс часов

Если бы вы хотели сбросить все настройки до заводских, пожалуйста, используйте тупой тонкий стержень для нажатия кнопки сброса

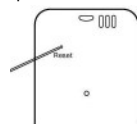

Ремень для переноски

Продается в отверстие на задней крышке.

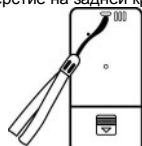

Спецификация

- * Тип сенсора: полупроводниковый оксидный
- * Диапазон измерений:
 - * 0,0...1,9 г/л
 - * 0,00...0,19 % BAC
- * Точность:
 - * 0,1 г/л
 - * 0,01 % BAC
- * Время операций: прогревание: 10-15s, отклик: <5s
- * Размеры: 100X37X17 мм

Внимание

- рекомендуется подождать как минимум 20 минут после принятия алкоголя перед тестированием, так как алкоголь до истечения этого времени еще остается в ротовой полости.
- не повторяйте тесты менее чем через три минуты
- не ешьте и не курите 20 минут до тестирования
- не вливайте жидкость в дыхательную трубку
- не используйте сильнопахнущие жидкости рядом с прибором
- не помещайте прибор в закрытое пространство с загрязненным воздухом
- результаты теста приводятся исключительно для ознакомления, производитель не несет никакой юридической ответственности за результаты тестов.